


# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

CPR ÜBUNGSPUPPE  
**PRACTI-MAN**  
UNERLÄSSLICH FÜR GRUPPENSCHULUNGEN

## 1 Wenn sich der Brustkorb beim Beatmen NICHT korrekt hebt, dann überprüfen Sie: :

### DASS DAS VENTIL:

- Richtig eingestellt ist und bei der Montage - wie auf dem Bild dargestellt- ein „Klick“ zu hören war.
- Trocken ist.

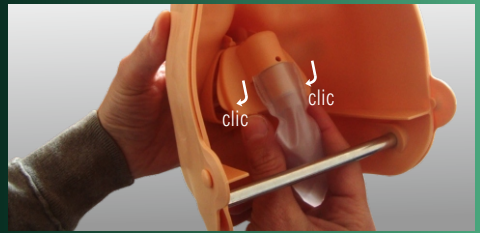

### DASS DIE LUNGE:

- Mithilfe des Aufklebers auf den markierten Stellen angebracht wurde.
- Locker auf dem Hals aufliegt.
- Weder verdreht noch zerknittert ist.
- Keine Risse aufweist oder Luft entweichen lässt.
- Im Inneren keine Feuchtigkeit aufweist.



### DASS DER KOPF:

- Korrekt an den beiden Kuppelhaken des Brustkorbes eingerastet ist.
- Die Gesichtshaut richtig angelegt wurde, um ein Entweichen der Luft zu verhindern.
- Korrekt nach hinten geneigt ist.



## 2 Korrekter Gebrauch der Lungen und des Ventils

### LUNGEN

Anders als bei anderen auf dem Markt erhältlichen Übungspuppen ist die **Practi-Man- Lunge ein Semi-Einweg-Produkt**, das heißt, dass die Lunge unter normalen Umständen während einer gesamten Trainingseinheit von mehreren Personen genutzt werden kann, also nicht ausgetauscht werden muss.




Sollte sich während der Schulung der Brustkopf plötzlich nicht mehr heben, so überprüfen Sie bitte, ob die Lunge feucht ist, denn Feuchtigkeit verhindert korrekten Lufteintritt. Wenn dies der Fall ist, so tauschen Sie die Lunge bitte aus.

### VENTIL

Beim Practi-Man-Ventil handelt es sich, genau wie bei der Lunge, um ein Semi-Einweg-Produkt. Für eine korrekte Anwendung muss es deshalb desinfiziert und trocken gelagert werden.

Wie oft das Ventil benutzt werden kann, ist nicht genau festgelegt, es sollte aber ausgetauscht werden, wenn mit der Zeit festgestellt wird, dass es nicht mehr so wirksam ist oder sich leicht ablösen lässt.

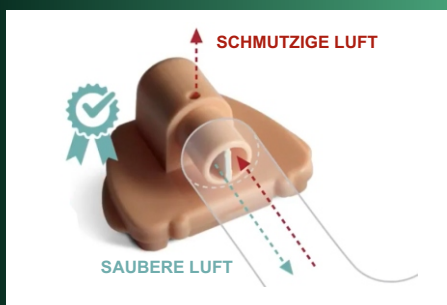

## 3 Wenn Sie bei der Brustkompression kein Klickgeräusch hören, dann überprüfen Sie:

- Dass der Auswahlschalter nicht auf der NEUTRAL („no click“)- Position eingestellt ist.
- Dass der Auswahlschalter nicht aus Versehen zwischen zwei Positionen eingestellt ist.

